

車いす・バギーの運搬専用携帯スロープ
パラキャリー

PARA CARRY
日本製

使用方法

1. 取り出す

軽量コンパクトで
持ち運びがラク！



2. 広げる

ワンタッチで
設置可能！



3. 車の荷台や段差に設置



4. 車輪の位置を確認



5. 車いす・バギーを
押し上げる



6. レール間に足を入れて
車内へ



レール間に足を
踏み込めるので
押し上げやすい！

⚠ 注意


車いすやバギーに人を乗せた状態で使用しないで下さい。
普通電動車いすには使用できません。
製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

(連結ベルト1セット付属)

		PARA RAIL					PARA CARRY
品名		パラレール 50C	パラレール 50	パラレール 90 (スリムタイプ)	パラレール 90W	パラレール 120C	パラキャリアー
サイズ	全長	50cm		90cm		120cm	120cm
	レール幅	21cm	21cm	18cm	21cm	21cm	21cm
	側壁高さ	内 2.0cm/外 3.0cm	内 2.0cm/外 3.0cm	2.5cm	3.0cm	3.0cm	3.0cm
材質	本体	炭素繊維強化 プラスチック (CFRP)	アルミ合金			炭素繊維強化 プラスチック (CFRP)	アルミ合金
	裏面		炭素繊維強化プラスチック (CFRP)				炭素繊維強化 プラスチック (CFRP)
	滑り止め	合成ゴム					
	連結ベルト (付属品)	特殊 PVA 樹脂					
重量		約 1.5kg/セット	約 2.2kg/セット	約 3.3kg/セット	約 3.9kg/セット	約 4.2kg/セット	約 4.1kg/セット
耐荷量		300kg/2本セット (150kg/レール1本)		200kg/2本セット (100kg/レール1本)		300kg/2本セット (150kg/レール1本)	80kg/2本セット (40kg/レール1本)
広げた時の総巾 (連結ベルト付の時)							
S : ベルト長 23cm		65.5cm		59.5cm		65.5cm	
M : ベルト長 28cm		70.5cm		64.5cm		70.5cm	
L : ベルト長 33cm		75.5cm		69.5cm		75.5cm	
希望小売価格 (消費税抜)		85,000 円	48,000 円	60,000 円	65,000 円	110,000 円	69,000 円
交換用連結ベルト:別売		1,500 円 (消費税抜)					


連結ベルト選択方法

単位: cm

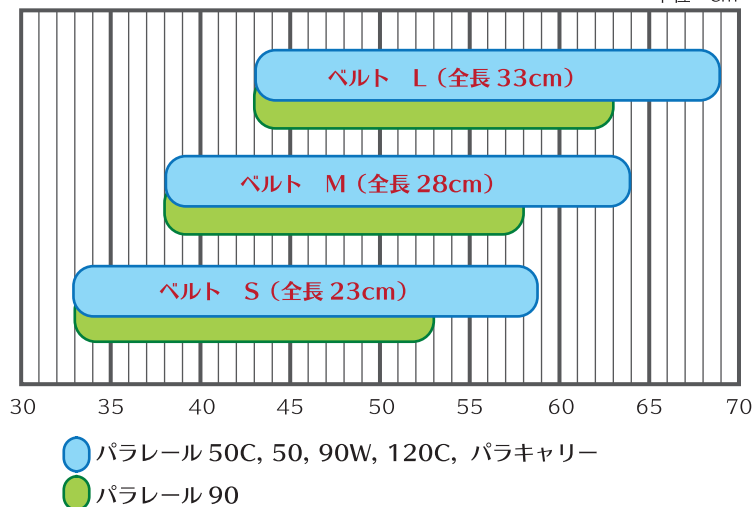

・下記寸法図を参考にご使用になる車いす・バギーの
“前輪の内 - 内間距離”と“後輪の外 - 外間距離”
を測り、「両方の寸法」が左表の範囲内となるベルト
を選択してください。

・複数のベルトが選べる場合は、「両方の寸法」ともに
範囲に余裕のあるベルトを選択ください。

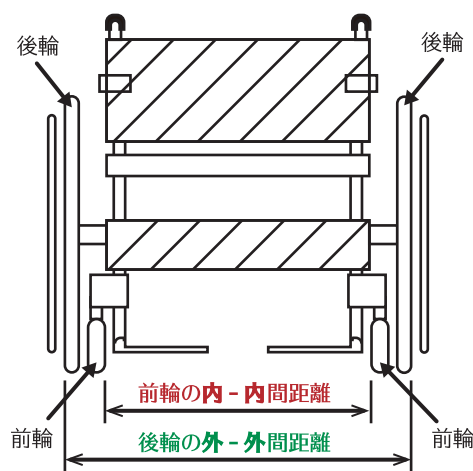

※ ご購入を希望される方は最寄りの販売店にお問合せください。
補助制度については地元の市区町村へご確認ください。

このカタログは製品の性能、品質の全てについてご説明するものではありません。
詳細につきましてはふぁみーゆツダコマ(株)または販売店までご相談下さい。
※このカタログの製品仕様及び内容は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ



ふぁみーゆツダコマ株式会社

〒921-8031 石川県金沢市野町5丁目18番18号
TEL: 076-244-9101 FAX: 076-244-9253
E-mail: para_rail@famille-t.co.jp
www.famille-t.co.jp

販売店

販売製造

DREAM NAVIGATOR
SINCE 1909
TSUDA KOMA

津田駒工業株式会社
コンポジット機械部

C14YQC01TJ